

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор стоматологический для полирования и препарирования зубов методом абразивной струи «ФЛОУ-КЛИНЗ»

ТУ 9391-011-67200978-2011
ПУ № ФСР 2012/13178 от 29.09.2016 г.

Набор **Флоу-Клинз**[®] выпускается в виде порошков двух типов:

- порошок № 1 (ПРОФИ) для профилактической обработки зубов;

- порошок № 2 (КОРУНД) для препарирования полостей;

и в виде суспензии для обработки твердых тканей зубов.

Порошки и суспензия **Флоу-Клинз**[®] выпускаются отдельно.

ПОКАЗАНИЯ

Область применения — стоматология. Для профессионального применения в медицинских организациях врачами-стоматологами.

Порошок № 2 Флоу-Клинз[®]-КОРУНД предназначен для удаления твердых зубных отложений; инвазивного препарирования и обработки кариозных полостей; подготовки зубов, пораженных поверхностным кариесом, к реставрации, а также для обработки препарированной под коронку культи и внутренней поверхности коронки с целью создания шероховатости для усиления адгезии фиксирующего цемента.

Суспензия Флоу-Клинз[®] предназначена для удаления зубного налета, поддесневого камня без повреждения твердых тканей и с одновременной полировкой зубных поверхностей, для удаления зубного налета под ортодонтическими конструкциями, из зубодесневого кармана с целью снижения содержания бактерий и уменьшения глубины пародонтального кармана, а также для профилактической обработки имплантов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость.

С осторожностью применять к пациентам с аллергическими реакциями на пищевые добавки.

Не использовать не по назначению.

ПОБОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Порошок № 2 Флоу-Клинз[®]-КОРУНД содержит в качестве активного абразива оксид алюминия (корунд) с фракцией 25–30 мкм. Твердость и размер частиц абразива позволяют эффективно удалять твердые зубные отложения и безболезненно препарировать ткани зуба, пораженные поверхностным кариесом. После воздействия абразивной струи поверхность становится шероховатой, поэтому нет необходимости в травлении с применением кислот перед реставрацией. При обработке культи и внутренней поверхности коронки образуются многочисленные точки ретенции (шероховатости), что способствует увеличению адгезии фиксирующего цемента.

Суспензия Флоу-Клинз[®] содержит кальция фосфат (3–5 мкм) и водорастворимый наполнитель, антисептические и вкусовые добавки. С помощью ультразвукового воздействия (типа системы Vector) частицы суспензии безболезненно очищают твердые ткани зуба в труднодоступных зонах. Применение суспензии позволяет значительно снизить содержание эндотоксинов без повреждения природных твердых тканей зубов, безболезненно и менее травматично провести кюретаж, а также терапию и профилактику для пациентов с имплантами.

Материалы изготовлены для применения в агрессивной биологической среде в диапазоне температур от 32 °С до 42 °С (в условиях полости рта при температуре (37±1) °С и влажности (60–90) %).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Порошки Флоу-Клинз® используют согласно инструкциям к воздушно-пескоструйным аппаратам или наконечникам отечественного и импортного производства.

Перед применением порошков необходимо врачу и пациенту защитить от пыли глаза и волосы, предупредить пациента с контактными линзами о возможном попадании пыли. Углы рта пациента следует обработать вазелином, поместить слюноотсос в угол рта пациента.

Перед применением резервуар необходимо заполнить порошком на половину объема и подобрать режим подачи струи сжатого воздуха, воды и порошка, не направляя в полость рта пациента.

Порошок № 2 Флоу-Клинз®-КОРУНД применяют согласно инструкциям, прилагаемым к аппаратам пескоструйного типа **с наконечником для препарирования зубов.**

По окончании работы необходимо очистить наконечник от порошка!

Не оставлять порошок в резервуаре! Флаконы с порошками следует плотно закрывать после каждого применения.

Суспензию Флоу-Клинз® применяют согласно инструкциям к аппаратам типа ультразвуковой системы Vector.

Внимание! Перед применением флакон с суспензией следует тщательно встряхнуть.

ФОРМА ВЫПУСКА

Порошок № 2 Флоу-Клинз®-КОРУНД (флакон)	220 г
Суспензия (флакон)	100 мл
Инструкция по применению	1 шт.

Порошок и суспензия выпускаются отдельно.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от 5 °С до 25 °С.

Транспортировать при температуре от 5 °С до 25 °С.

Несоблюдение условий хранения и транспортирования ведет к ухудшению качества и сокращению срока годности материала, за что производитель ответственности не несет.

Храните материал в упаковке с инструкцией до окончания использования.

После вскрытия упаковки срок применения материала ограничен сроком годности.

Медицинское изделие не подлежит периодическому техническому обслуживанию и текущему ремонту.

Срок годности — 3 года от даты изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация материала должна проводиться согласно общим правилам организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в медицинских организациях для безопасных медицинских отходов класса А.

АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ООО «ТехноДент»

Березовая ул., д. 1/6, п. Северный,
Белгородский р-н, Белгородская обл.,
Россия, 308570

Тел.: 8 800 350-09-73

E-mail: info@tehnodent.org

www.tehnodent.org