

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материал стоматологический для обработки эмали, удаления зубного камня и полирования пломб из композитных материалов «ПОЛИРЕН®»

по ТУ 9391-014-67200978-2011
РУ № ФСР 2012/13179 от 08.04.2020 г.

ПОКАЗАНИЯ

Для профессионального применения в медицинских организациях.

Область применения — стоматология.

Материал стоматологический **ПОЛИРЕН®** представляет собой пасты для обработки эмали, удаления зубного камня и полирования пломб из композитных материалов: паста «**Полирен® № 1**», паста «**Полирен® № 2**», паста «**Полирен® № 3**».

Паста «**Полирен® № 1**» предназначена для размягчения и удаления зубного камня без повреждения эмали.

Паста «**Полирен® № 2**» предназначена для обработки эмали перед реставрацией или отбеливанием зубов, перед проведением герметизации фиссур, для удаления мягкого налета, пелликулы, а также для профилактики кариеса (профессиональная чистка зубов).

Паста «**Полирен® № 3**» предназначена для окончательной обработки пломб из композитных и стеклоиономерных материалов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость.

Не использовать не по назначению.

ПОБОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Пасты **ПОЛИРЕН®** содержат мелкодисперсные абразивные наполнители, определяющие полирующие свойства паст, антисептические добавки, биоинертный наполнитель и легко смываемый водой пастообразователь.

Паста «**Полирен® № 1**» содержит кислотный компонент (лимонная кислота), обеспечивающий быстро и эффективное размягчение твердых зубных отложений, и абразивный наполнитель для очищения зубов без повреждения эмали.

Паста «**Полирен® № 2**» содержит в качестве абразива кварц с размером частиц не более 50 мкм.

Паста «**Полирен® № 3**» содержит абразивы: кварц и корунд (5 мкм), наполнитель и гидрофильный пастообразователь.

Материалы изготовлены для применения в агрессивной биологической среде в диапазоне температур от 32 °С до 42 °С (в условиях полости рта при температуре (37±1) °С и влажности (60–90) %).

Материал стоматологический **ПОЛИРЕН®** относится к неактивным нестерильным медицинским изделиям многократного применения, доза материала используется однократно.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением пасты «**Полирен® № 1**» необходимо защитить десну от попадания на нее кислотосодержащей пасты. Пасту нанести точно на область зубных отложений на 3–5 минут. Затем с помощью циркулярной щетки или резиновой насадки на средней скорости без особых усилий провести обработку поверхности зуба. При необходимости процедуру следует повторить со свежей порцией пасты. После очищения смыть пасту водой и провести реминерализацию или фторирование эмали. Для применения пасты «**Полирен® № 2**» небольшое количество пасты нанести на циркулярную щетку. На средней скорости без особых усилий обработать поверхность или фиссуру зуба. Затем обработанные поверхности следует промыть водой и просушить.

Перед применением пасты «**Полирен® № 3**» следует удалить излишки пломбировочного материала с помощью алмазных головок и пломбу просушить. Затем нанести пасту на рабочую поверхность пламевидной головки или чашечки и без давления на средней скорости обработать поверхность пломбы, добавляя по каплям воду в процессе обработки.

Внимание! После каждого применения тару с материалом необходимо плотно закрывать крышкой. При длительном пребывании в открытом состоянии паста загущается и теряет пластичность. В этом случае к пасте можно добавить несколько капель дистиллированной воды и тщательно перемешать до однородной консистенции.

ФОРМА ВЫПУСКА

Материал стоматологический для обработки эмали, удаления зубного камня и полирования пломб из композитных материалов **ПОЛИРЕН®** выпускается в отдельных упаковках.

Паста «Полирен® № 1»:

шприц (3 мл, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
шприц (3 мл, 2 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
шприц (5 мл, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
банка (40 г, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
банка (45 г, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
туба (40 г, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
туба (50 мл, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)

Паста «Полирен® № 2»:

шприц (3 мл, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
шприц (3 мл, 2 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
шприц (5 мл, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
банка (40 г, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
банка (45 г, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
туба (40 г, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
туба (50 мл, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)

Паста «Полирен® № 3»:

шприц (3 мл, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
шприц (3 мл, 2 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
шприц (5 мл, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
банка (40 г, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
банка (45 г, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
туба (40 г, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
туба (50 мл, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от 5 °С до 25 °С.

Транспортировать при температуре от 5 °С до 25 °С.

Несоблюдение условий хранения и транспортирования ведет к ухудшению качества и сокращению срока годности материала, за что производитель ответственности не несет.

Храните материал в упаковке с инструкцией до окончания использования.

После вскрытия упаковки срок применения материала ограничен сроком годности.

Материал стоматологический **ПОЛИРЕН®** не подлежит периодическому техническому обслуживанию и текущему ремонту.

Срок годности — 3 года от даты изготовления.

Качество, эффективность и безопасность материала стоматологического **ПОЛИРЕН®** при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, утилизации и инструкции по применению медицинского изделия гарантируется в течение срока годности.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация материала должна проводиться согласно общим правилам организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в медицинских организациях для безопасных медицинских отходов класса А.

АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ООО «ТехноДент»

Березовая ул., д. 1/6, п. Северный, Белгородский р-н,


Белгородская обл., Россия, 308570

Тел.: 8 800 350-09-73

E-mail: info@tehdent.org

www.tehdent.org

Расшифровка символов:

	Дата изготовления		Беречь от влаги
	Использовать до		Не допускать воздействия солнечного света
	Номер по каталогу		Температурный режим
	Обратитесь к инструкции по применению		Код партии
	Хрупкое, обращаться осторожно		

1.014.002-01.02.03_RU_003

Дата последней редакции: 2020-01